

INFORMACIÓN DEL APARATO SLEEP-BLOCK

Objetivos:

Reducir el ronquido
Mejorar el descanso nocturno
Bajar el ratio de apneas
Sustituir otras técnicas

Materiales utilizados:

RESINA DENTAURUM - Orthocryl- Flüssigkeit (monomer), Líquido (monomer), Rosa transparente, Methacrylate.

- Orthocryl- Polymethylmethacrylat, Polvo (polímero).

ERKODENT-LÁMINAS Y PLACAS DE TERMOFORMACIÓN

LEONE- MICRODISYUNTOR RÁPIDO MONOBRAZO.

LEONE- PLANOS LATERALES INOX BLANDO 0,5MM

PLAQUIT-LACA FOTOPOLIMERIZABLE- Methylmethacrylat,pentacrythritriacrylat.

USO Y MANEJO DEL PACIENTE



LIMPIEZA , MANTENIMIENTO
INSERCIÓN Y DESINSERCIÓN
REVISIONES




Activación tornillo
4 activaciones + 1mm

VISTA FRONTAL Y LINGUAL



Tornillo de sujeción lingual
Desmontar para activar tornillo interno

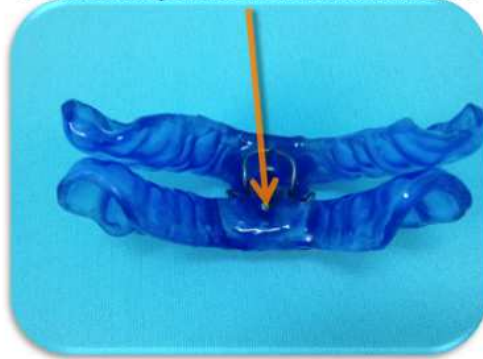

Normas:

Necesitamos modelo superior e inferior y cera de mordida constructiva

Los trabajos se realizan en 10 días laborables

La garantía del aparato es de 6 meses (la garantía no incluye un mal uso del aparato)

El aparato no garantiza dejar de roncar en determinadas patologías

Es necesario confirmar su fiabilidad en una unidad del sueño

PROTOCOLO

No forzar el avance mandibular + del 40% de el avance total

- + IMPRESIÓN SUPERIOR E INFERIOR (alginato o silicona)
- + CERA DE MORDIDA CONSTRUCTIVA (relación borde a borde con 3mm de apertura, confirmar que el paciente en esta posición no tiene dolor y admite más avance).



Precio:

El precio del aparato Sleep-blocks es de 190€